

MASCARILLA QUIRÚRGICA HIGIÉNICA NO SANITARIA

● ● ● FABRICADO EN ESPAÑA


Mascarilla de tres capas,
Meltblown y Spunbound 100% Polipropileno
USO ÚNICO / 4 HORAS
Índices y normas,
EN14683 2019
Eficacia de filtración bacteriana (BPE) ≥ 95%
Respirabilidad (Presión diferencial) <60Pa/cm²

CAJA DE 50 UNIDADES

Medidas de la caja: 190 X 100 X 100
Medidas caja de cartón: 400 X 400 X 400
Medidas del pallet: 1200 x 800



CAJA50	CAJA	CARTÓN	PALLET	PALLET
CARTONES			12	24
CAJAS	1	32	384	768
MASCARILLAS	50	1.600	19.200	38.400

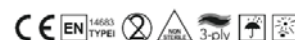

ADVERTENCIAS DE USO



Colocación de la mascarilla

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar las gomas elásticas a ambos lados de las orejas, sin cruzar.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla cubriendo la barbilla.
6. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
7. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente, verificando el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
8. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla, si es necesario hacerlo, lavarse las manos previamente con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Retirada de la mascarilla

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
2. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.
3. Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico.
4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Procedimiento para desechar la mascarilla

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferentemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa por si se produjera un desgarramiento de la bolsa exterior. Las mascarillas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

Duración de uso recomendado

Por cuestión de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva.